

G-CEM LinkForce ТЕХНІЧНА КАРТА

ТЕХНІКА ЦЕМЕНТУВАННЯ ВІНІРІВ

▶ ПРИМІРЮВАЛЬНА ФІКСАЦІЯ

Зніміть тимчасову конструкцію та ретельно очистіть куксу.

1



Перевірте припасавання та оклюзію. За необхідності використовуйте G-CEM LinkForce Try-In Paste.

2



Зніміть конструкцію та промийте водою.

3




▶ ПІДГОТОВКА КОНСТРУКЦІЇ

Підготуйте каркас відповідно до інструкцій виробника.

▶ Склокераміка

Протравіть плавиковою кислотою.

1

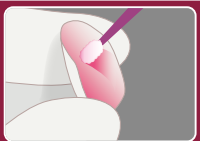

Промийте та висушіть.

2



▶ Гібридна кераміка та композити



Проведіть піскоструменеву обробку *
*Як альтернатива для CERASMART, ви можете застосувати плавикову кислоту.

1




Очистіть струменем повітря. Промийте та висушіть.

2

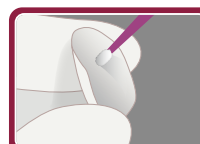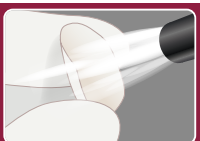

Нанесіть G-Multi PRIMER.

3

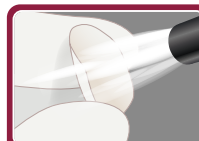

Просушіть струменем повітря.


4

▶ ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ ЗУБА




Промийте та висушіть відпрепарований зуб.

5

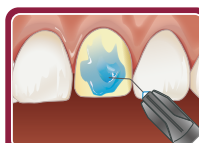

Виберіть техніку або вибіркового протравлювання, або тотального протравлювання. Промийте та просушіть.

6

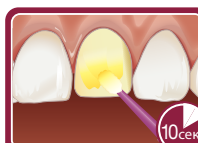

Нанесіть G-Premio BOND. Зачекайте 10 секунд.

7



Просушіть при МАКСИМАЛЬНОМУ ТИСКУ ПОВІТРЯ протягом 5 секунд.

8



Полімеризуйте світлом протягом 10 секунд (Галоген/LED 700 мВт/см²).

9

▶ ФІКСАЦІЯ




Нанесіть цемент безпосередньо на адгезивну поверхню вініра та/або на поверхню зуба.

10



Одразу встановіть конструкцію на відпрепарований зуб. Застосовуйте помірне зусилля.

11

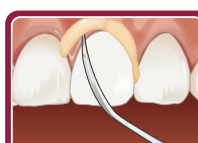

Видаліть надлишки. Ви можете «прихвтити» надлишки за допомогою світлової полімеризації протягом 1-2 секунд.

12



Полімеризуйте світлом кожну поверхню/край протягом 20 секунд (Галоген/LED 700 мВт/см²).

13



Фініруйте та відполіруйте краї.

14


ТЕХНІКА ЦЕМЕНТУВАННЯ ШТИФТІВ ТА КУКСОВИХ ВКЛАДОК

▶ ПІДГОТОВКА КОНСТРУКЦІЇ

Підготуйте конструкцію відповідно до інструкцій виробника


Очистіть спиртом.

1

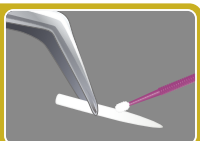

Нанесіть G-Multi PRIMER.

2

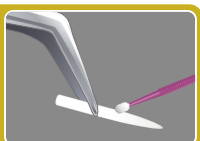


Просушіть струменем повітря.

3



▶ ПІДГОТОВКА ЛОЖЕ ШТИФТА

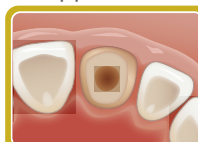

Очистіть кореневий канал, використовуючи гіпохлорит натрію або ЕДТА. Промийте та ретельно просушіть.

4




Змішайте G-Premio BOND та DCA у пропорції 1:1.

5



Нанесіть суміш у ложе штифта та залишіть на 20 секунд.


6

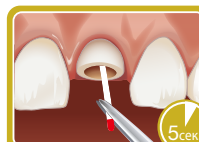

Просушіть при МАКСИМАЛЬНОМУ ТИСКУ ПОВІТРЯ протягом 5 секунд. Видаліть будь-які надлишки бондинг-агенту використовуючи паперові штифти.


7

▶ ФІКСАЦІЯ

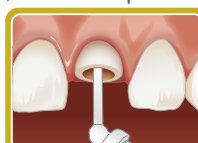

Видавіть G-CEM LinkForce у ложе штифта.

8

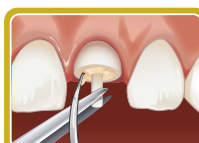


Одразу встановіть штифт у ложе. Видаліть надлишки цементу.

9



Полімеризуйте світлом кожну поверхню/край протягом 20 секунд (Галоген/LED 700 мВт/см²).

10

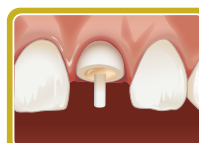

Не торкайтеся матеріалу протягом 4 хвилин після встановлення штифта. Продовжуйте нарощування кукси.

11

► ПРИМІРЮВАЛЬНА ФІКСАЦІЯ


Зніміть тимчасову конструкцію та ретельно очистіть кукусу.

1



Перевірте припасаування та оклюзію. За необхідності використовуйте G-CEM LinkForce Try-In Paste.

2

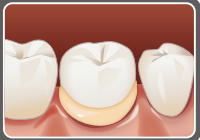

Зніміть конструкцію та промийте водою.

3




► ПІДГОТОВКА КОНСТРУКЦІЇ

Підготуйте конструкцію згідно з інструкцією виробника.

► Склокераміка

Протравіть плавиковою кислотою.

1

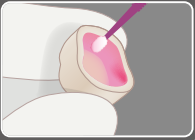

Промийте та висушіть.


2



► Метал, Цирконій, Алюміній, Гібридна кераміка та Композит


Проведіть піскоструменеву обробку*
*Як альтернатива для CERASMART, ви можете застосувати плавикову кислоту.

1

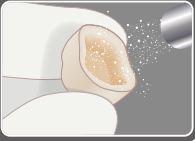

Продуйте до чистоти струменем повітря. Промийте та висушіть.

2

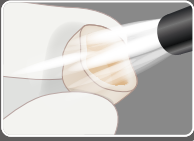


Нанесіть G-Multi PRIMER.

3



Просушіть струменем повітря.

4

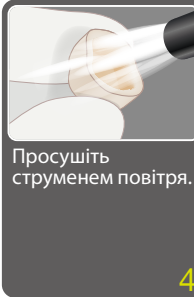

► ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ ЗУБА

Промийте та висушіть відпрепарований зуб.

5



Оберіть одну з трьох технік протравлювання: самопротравлювання, вибіркове протравлювання чи тотальне протравлювання. Промийте та висушіть.

6



► Світлова полімеризація


Нанесіть G-Premio BOND. Зачекайте 10 секунд.

7




Просушіть при МАКСИМАЛЬНОМУ ТИСКУ ПОВІТРЯ протягом 5 секунд.

8

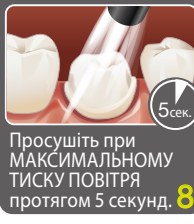

Полімеризуйте світлом протягом 10 секунд (Галоген/LED 700 мВт/см²).

9

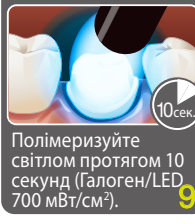

► Альтернативний режим подвійного твердіння


Змішайте G-Premio BOND та DCA у пропорції 1:1.

7



Нанесіть суміш. Зачекайте 20 секунд.

8

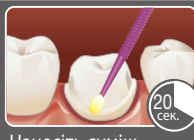

Просушіть при МАКСИМАЛЬНОМУ ТИСКУ ПОВІТРЯ протягом 5 секунд.

9



► ФІКСАЦІЯ

Видавіть G-CEM LinkForce безпосередньо в конструкцію.

10



Негайно помістіть на підготовлений зуб/абатмент. Застосовуйте помірне зусилля.

11



Видаліть надлишки паралельно застосовуючи помірне зусилля. Ви можете «прихватити» надлишки за допомогою світлової полімеризації протягом 1-2 секунд.

12



Полімеризуйте світлом кожну поверхню/край протягом 20 секунд (Галоген/LED 700 мВт/см²).

13



Якщо світлова полімеризація не використовується, для затвердіння потрібні 4 хвилини після встановлення конструкції. Фініруйте та відполіруйте край, якщо це необхідно.

14

