

Силер для пломбування кореневих каналів.

Опис

Шур-Сіл Рут – зручна, попередньо змішана, готова до використання паста на основі біоактивного силікату кальцію, яка розроблена для постійної обтурації кореневого каналу зуба. Шур-Сіл Рут – суміш на основі алюмосилікату кальцію, для тужавіння та твердіння якої необхідна вода. Шур-Сіл Рут не дає усадки під час затвердіння і демонструє відмінні фізичні властивості.

Час затвердіння

Час затвердіння становить 25 хвилин, вимірюється відповідно до ISO 6876:2012 (100% вологість повітря). Однак у каналах кореня зуба час затвердіння може становити понад 2,5 години.

Склад

Алюмосилікат кальцію, оксид цирконію, наповнювач, згущувач.

Показання до застосування

Постійна обтурація кореневого каналу зуба.

Спосіб використання

1. Відпрепаруйте та промийте канал кореня зуба, використовуючи стандартні ендодонтичні методики.
2. Зніміть ковпачок зі шприца Шур-Сіл Рут. Надійно приєднайте одноразову внутрішньоканальну насадку до канюлі шприца, повертаючи її за годинниковою стрілкою. Одноразова насадка гнучка і її можна зігнути, щоб полегшити доступ до кореневого каналу.
3. Помістіть кінчик насадки, що встановлена на шприц, у кореневий канал не глибше, ніж на одну третину (1/3) у корональній частині. Акуратно та рівномірно видавіть пасту Шур-Сіл Рут у верхівку каналу кореня зуба. На цьому етапі можна зробити рентгенівський знімок для забезпечення адекватного апікального запечатування. Якщо кількість матеріалу недостатня, ретельно вимийте пасту Шур-Сіл Рут з кореневого каналу і повторіть процедуру.
4. Продовжуйте заповнювати канал кореня зуба пастою Шур-Сіл Рут після зняття одноразової насадки. Повністю заповніть канал кореня зуба; уникайте утворення повітряних бульбашок і переповнення кореневого каналу.
5. Видаліть надлишок пасту Шур-Сіл Рут з верхньої частини каналу кореня зуба вологою ватною кулькою.
6. Помістіть гутаперчеві штифти у кореневий канал, використовуючи стандартні ендодонтичні методики.

Застереження

1. Для використання лише в стоматології.
2. Для застосування тільки лікарями-стоматологами. Дотримуйтесь процедур і запобіжних заходів.
3. Зберігайте у місцях недосяжних для осіб, що не працюють у сфері стоматології, а також дітей, літніх людей та інших осіб.
4. Не видавлюйте пасту з надмірним зусиллям, оскільки це може викликати больові відчуття у пацієнта.
5. Не виводьте матеріал за межі верхівки каналу кореня зуба.
6. При випадковому попаданні в очі негайно промийте їх великою кількістю води.
7. Не застосовуйте повторно одноразову насадку після застосування.
8. Не застосовуйте після закінчення терміну придатності.
9. Не використовуйте для лікування внутрішніх захворювань.

Зберігання

1. Утримуйте шприц зі щільно закритим ковпачком, коли він не використовується.
2. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів.
3. Зберігайте у прохолодному місці.

Символи



Використати до



Код партії



Номер
за каталогом



Медицинський
виріб



Ознайомитися
з інструкцією
з Використання



Температурне
обмеження



Виробник



Знак відповідності
Технічному регламенту
в Україні

Термін придатності

2 роки з дати виробництва.

Гарантія

«Шур Дент Корпорейшн» замінить продукт, якщо буде доведено, що він непридатний для використання. «Шур Дент Корпорейшн» не несе відповідальності за будь-які пошкодження або збитки, прямі чи непрямі, що виникають у зв'язку з використанням або неможливістю застосування вказаного продукту. Стоматолог несе відповідальність за визначення придатності продукту перед його використанням за призначенням. Стоматолог бере на себе всі ризики та відповідальність у зв'язку із застосуванням продукту.

Дата останнього перегляду інструкції: 01.06.2024

 SURE DENT CORPORATION
809, 52 Sagimakgoko, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13210, Korea
Тел: +82-31-737-4720
Факс: +82-31-737-4724
E-mail: suredent@suredent.com

«ШУР ДЕНТ КОРПОРЕЙШН»
No 809, 52, Sagimakgol-ro, Chungwon-gu,
Sonnam-si, Gyeonggi-do, 13210, Korea
Тел.: +82-31-737-4720
Факс: +82-31-737-4724
Ел. адреса: suredent@suredent.com



UA-TR.137

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «КРИСТАР-ЦЕНТР», вул. Межигірська,
буд. 50, кв. 2, м. Київ, 04071, Україна
тел: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua,
www.kristar.ua