

На які **важливі фактори**
ви звертаєте увагу, коли....




Шукаєте
шлях
**вдосконалення
результату вашої роботи
з коронками та мостами?**

- Стандартизовану процедуру для найбільш розповсюджених випадків?
- Ефективний адгезивний зв'язок не тільки з натуральними зубами, а й із відновленими куками та металевими абатментами?
- Застосовувати або не застосовувати протравлення, з майже відсутньою постопераційною чутливістю?
- Універсальний праймер, який з'єднується з усіма поверхнями: від кераміки до дорогісінних сплавів?



Шукаєте
**ідеального партнера
для вінірів?**

- Легке встановлення та видалення будь-яких надлишків?
- Ефективну світлову полімеризацію адгезива та цементу?
- Асортимент відтінків, який підійде до будь-якої ситуації: від дисколорованої до відбіленої куки?
- Набір відповідних try-in (пробних) паст, що відповідають відтінкам?
- Флюоресценцію, щоб сприяти кінцевому естетичному результату?

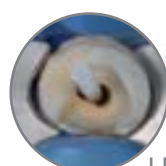

Шукаєте **оптимальне
рішення для фіксації
штифтів?**

- Можливість протравлювання дентину в глибоких каналах?
- Ідеальну полімеризацію адгезива, коли змішуєте активатор хімічної полімеризації та вносите в канали?
- Низьку в'язкість для ідеального внесення штифта?
- Відмінну хімічну полімеризацію для довготривалої адгезії?



Шукаєте
**правильний підхід
до вкладок, накладок
та облицювальних
коронки?**

- Міцний зв'язок, навіть на неретентційних поверхнях?
- Ефективне твердіння, навіть під непрозорою реставрацією?
- Стабільність крайового прилягання та зносостійкість на оклюзійних краях?
- Матеріал, що чудово підходить для всіх CAD/CAM реставрацій, включаючи гібридну кераміку, таку як CERASMART™?

Ви можете розраховувати на
G-CEM LinkForce
в будь-яких клінічних ситуаціях,
за будь-яких показань,
із будь-яким матеріалами

G-CEM LinkForce

Міцний та універсальний адгезивний цемент у ваших руках!

Чотири різні відтінки та їхні відповідні Try-in Пасты, щоб задовольнити всі ваші естетичні потреби.



Translucent
(Чистий Прозорий)
Ідеальний для тонкої
конструкції, щоб
зберегти натуральний
відтінок



A2
(A2 Прозорий)
Стандарт для фіксації
більшості ваших
конструкцій



Opaque
(Універсальний Опаке)
Для маскувння
дисколорованих
поверхонь куки, якщо
це потрібно



Bleach
(Відбілений Опаке)
Адаптований до
ультрабілої конструкції,
щоб підвищити опаковість
та насиченість

Доступні набори

System Kit

- G-CEM LinkForce A2, G-CEM LinkForce Translucent, G-Premio BOND, G-Premio BOND DCA, G-Multi Primer, G-CEM LinkForce Try-in Пасты (A2 та Translucent), GC Etchant, Аксесуари

Starter Kits

- G-CEM LinkForce A2, G-Premio BOND, G-Multi Primer, Аксесуари
- G-CEM LinkForce Translucent, G-Premio BOND, G-Multi Primer, Аксесуари

Окремо

- Шприц 8.7 г (Translucent / A2 / Opaque / Bleach)
- Try-in Паста 1 г (Translucent / A2 / Opaque / Bleach)
- G-Premio BOND, 5 мл
- G-Premio BOND DCA, 3 мл
- G-Multi-Primer, 5 мл



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEO Ukraine
04071 м. Київ
вул. Костянтинівська 32, оф. 11
Тел. (044) 463.62.66
info.ukraine@gc.dental
https://europe.gc.dental/uk-UA

Офіційний дистриб'ютор
компанії GC в Україні:
Група компаній "КРИСТАР"
04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел/Факс: (044) 503.11.11
info@kristar.ua
www.kristar.ua

GC

GC



Створений розв'язати
всі ваші адгезивні складнощі.

Розроблений тримати вічно



**G-CEM
LinkForce™**
від GC

Адгезивний цемент
подвійного твердіння
для ВСІХ показань
та каркасів

G-CEM LinkForce від GC

Шукаєте уніфіковане рішення для всіх випадків фіксації?

Різні типи конструкцій... Різні типи каркасів... Це все стає дуже заплутаним!

Від вкладок/накладок, облицювальних коронок, вінірів, люмінірів до CAD/CAM протезів – вибір між різними типами конструкцій став занадто широкий. Додайте також нові матеріали для каркасів: цирконій, дисилікат літію та гібридну кераміку. Стає зрозумілим, що освоєння всіх процедур та етапів цементування відповідно до всіх показань є дуже складним завданням.

Чи існує єдиний продукт, що може адаптуватися до будь-якої ситуації?

Уявіть собі універсальне рішення, яке пропонує прогнозований результат та дозволяє вам працювати стандартизованим шляхом. Якщо це те, що ви шукаєте – ваші пошуки скінчилися. GC розробили для вас універсальний адгезивний композитний цемент, який забезпечує міцний зв'язок із будь-яким каркасом, за будь-яких показань без компромісів.


G-CEM LinkForce від GC – універсальне та потужне розв'язання всіх ваших проблем із адгезивним цементуванням

Одна система, три основні елемента – це все, що потрібно, аби створити міцну адгезію в будь-яких ситуаціях



Чудова здатність G-CEM LinkForce до хімічного твердіння кожного разу гарантуватиме надійність адгезії

Чи знали ви, що в залежності від типу матеріалу для виготовлення протезу, лише невелика частина світла проникає крізь реставрацію? Відтоді як стало складно покладатися повністю на проникнення світла, G-CEM LinkForce був створений, щоб забезпечити ідеальну адгезію, навіть у режимі хімічного твердіння.

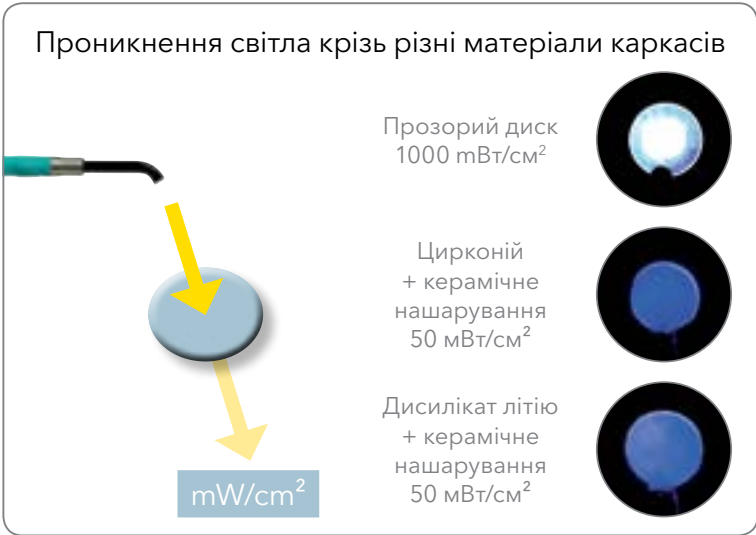

Джерело: Pettegata Inc., Університет Сан-Паулу, Бразилія. Файл даних

Продуктивність, якій ви можете довіритися на кожному етапі фіксації

G-Premio BOND

Безкомпромівна адгезія до кукси з БУДЬ-ЯКОГО матеріалу

Адгезія до кукси з будь-якого матеріалу

Навіть коли кукса включає в себе композит або металевий абатмент, трьохфункціональний мономер, що міститься у G-Premio BOND, забезпечить надійну адгезію.

Виберіть один із трьох варіантів режиму протравлювання

G-Premio BOND може використовуватися при будь-якому режимі протравлювання (самопротравлювання, вибіркове протравлювання або тотальне) з майже відсутнім ризиком постопераційної чутливості.

Легке нанесення бонду

Завдяки його в'язкості та змочуваності, G-Premio BOND легко наносити.

Проста процедура сушіння та товщина плівки (3 мкм)

Сушіння повітрям під максимальним тиском протягом 5 секунд та мінімальна товщина плівки (3 мкм) гарантують ідеальне припасування протезів.

CEM-фотографії: конструкції з CERASMART (A), бондингу до дентину (D), використання G-Premio BOND (C) та G-CEM LinkForce (B)
Джерело: GC R&D, Японія

Обирайте між хімічною та світловою полімеризацією

Світлове твердіння адгезиву забезпечує негайний контроль за полімеризацією та зменшує кількість кроків під час процедури.

Подвійне твердіння (завдяки змішуванню з G-Premio BOND DCA) забезпечує надійну полімеризацію шару адгезива, наприклад, у випадку фіксації штифтів.

G-Multi Primer

Забезпечення надійного зв'язку з БУДЬ-ЯКИМИ ортопедичними конструкціями

Один праймер для всіх каркасів

G-Multi Primer використовує три різні хімічні агенти, щоб забезпечити ідеальну адгезію за будь-яких умов.

Завдяки додаванню силану до праймеру, а не до бонду, забезпечується стабільність адгезії.

Silane

Адгезія до склокераміки, гібридної кераміки та композитів

MDP

Адгезія до цирконію, алюмінію, та недорогочінних сплавів

MDTP

Адгезія до дорогочінних сплавів

G-CEM LinkForce

Забезпечення сильної фіксації за БУДЬ-ЯКИХ показань

Необхідний відтінок для кожного випадку

Після вибору одного з чотирьох доступних відтінків, ви оціните легкість автоматичного змішування та внесення прямо в конструкцію або за допомогою ендонасадки – в кореневий канал.

Встановлення в порожнину рота та забезпечення ідеального припасування

Оптимальна змочуваність та в'язкість забезпечать чудовий розподіл фіксуючої суміші. А плівка завтовшки 4 мкм гарантує відмінне припасування протезу до абатменту.

Зручне видалення надлишків



Можливість «прихватки» надлишків (за допомогою світлової полімеризації протягом 1-2 секунд) полегшує їх видалення.

Ефективна полімеризація в режимах хімічного та світлового твердіння


Завдяки ідеальній концентрації ініціаторів, полімеризація забезпечується, навіть коли світло не може пройти крізь конструкцію.

Висока поліруємість та зносостійкість

Використання ультрадрібних часток наповнювача, які однорідно поширені у високій концентрації, надає неперевершену зносостійкість, навіть коли границі конструкції розташовані на оклюзійній поверхні.

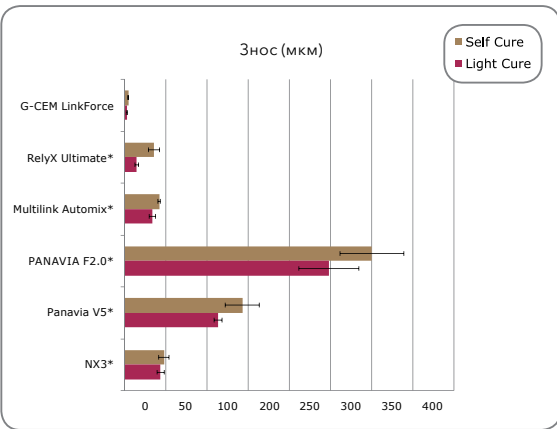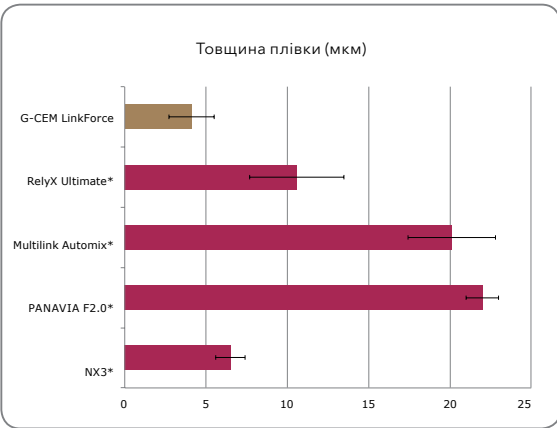

*Не є торговою маркою GC Europe

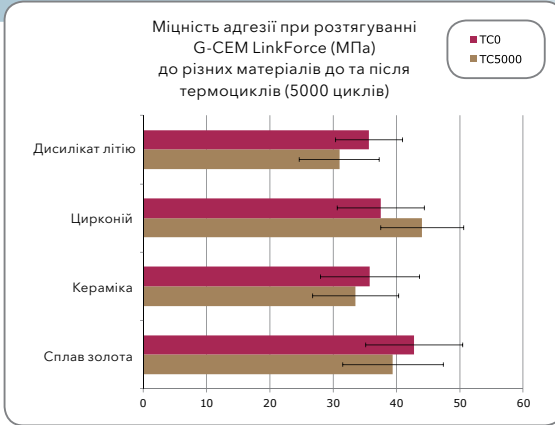

Джерело: GC R&D, Японія, 2015

Джерело: GC R&D, Японія, 2015

Джерело: GC R&D, Японія, 2015